



Opalescence™ PF 10 % ja 16 %

KARBAMIDIPEROKSIDIA SEKÄ KALIUMNITRAATTIA JA FLUORIDIA


- Kosmeettinen valkaisuhoito henkilökohtaisilla lusikoilla
- Opalescence PF -valkaisugeelit sisältävät kaliumnitraattia ja fluoridia
- Tahmea ja paksu geeli ei valu pehmytkudoksiin ja varmistaa lusikan pysymisen tiukasti paikallaan
- Opalescence PF -valkaisugeeli on suunniteltu tekemään hoidosta mahdollisimman miellyttävä potilaalle
- Erityinen koostumus estää kuivumista ja värjäytymän palautumista
- Kaksi pitoisuutta, kolme makuvaihtoehtoa (Mint, Melon ja Regular)
- Suurin osa hoidosta kotona, säästää aikaa vastaanotolla
- Päivä- tai yökäyttö

Koostumukseltaan tahmea ja viskoosinen Opalescence-geeli ei valu lusikasta kuten muut valkaisugeelit,⁴ ja se pitää lusikan tiukasti paikallaan. Opalescence-geeli sisältää kaliumnitraattia ja fluoridia. Korkeampi vesipitoisuus estää kuivumista ja värjäytymän palautumista, minkä ansiosta Opalescence on yksi luotettavimmista saatavilla olevista valkaisugeeleistä.²⁻⁵ Yliopistotutkimus osoittaa, että geeli pysyy aktiivisena 8–10 tuntia yökäytössä.⁵ Tämä merkitsee potilaille nopeita tuloksia ja lisääntyvää hoitomyöntyvyyttä. Opalescence-geelistä on saatavana eri pitoisuuksia, koostumuksia ja makuja sekä pakkauskokoja kaikkien potilaittesi valkaisu- ja värjäytymisiin.

Opalescence-geeliä suositellaan värjäytyneiden hampaiden valkaisuun ennen yhdistelmämuovirestaatioiden, laminaattien ja/tai kruunujen asettamista. Se poistaa tehokkaasti synnynnäisistä, systeemisistä, farmakologisista tai ikääntymiseen liittyvistä syistä johtuvia tai vammojen aiheuttamia hampaan sisäisiä värjäytymiä. Se tehoaa fluoroosiin sekä jopa tetrasykliin aiheuttamiin värjäymiin.⁴



PYSYY AKTIIVISENA KOKO YÖN!

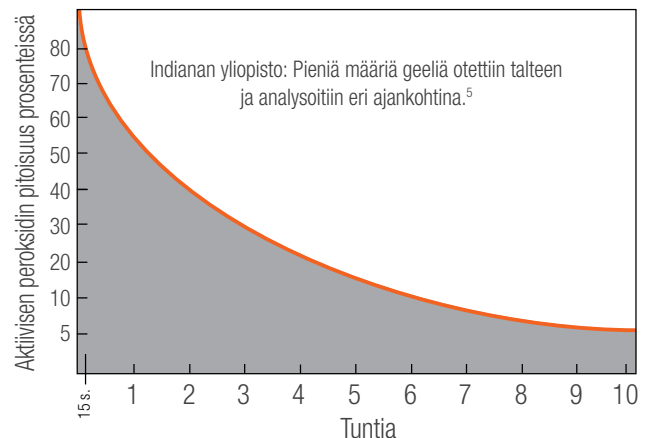

1. realityesthetics.com 2. Rosenstiel SF, Gegauff AG, Johnston WM. Efficacy and safety evaluations of a home bleaching procedure. 1994. The Ohio State University, College of Dentistry. Tiedot arkistossa. 3. Russell CM, Dickinson GL, Johnston MH, et al. Dentist-supervised home bleaching with ten percent carbamide peroxide gel: a six-month study. *J Esthetic Dent.* 1996;8(4):177-82. 4. Caughman WF, DMD, Frazier KB, Haywood, VB. Carbamide peroxide whitening of non-vital single discolored teeth: Case reports. *Quintessence Int.* 1999;30(3):155-61. 5. Matis BA, Gaio U, Blackman D, Schultz FA, Eckert GJ. In vivo degradation of bleaching gel used in whitening teeth. *J Am Dent Assoc.* 1999;130(2):227-35.



Ennen ja jälkeen

Robert Nuon



Ennen valkaisu.



Ylihampaat viiden Opalescence PF 10 % -hoitoyön eli noin 40 tunnin jälkeen.

Stephan Hoefler



Ennen valkaisu.



Kahdeksan Opalescence PF 16 % -hoitopäivän jälkeen, käyttöaika kunakin päivänä 3 tuntia.

Stephan Hoefler



Ennen valkaisu; uusien restauraatioiden suunnittelu.



Kuuden Opalescence PF 16 % -hoitopäivän jälkeen, käyttöaika kunakin yönä 8 tuntia. Uudet yhdistelmämuovirestaaraatiot ovat paikoillaan.

Ohjeet potilaalle



1. Pyydä potilasta harjaamaan hampaansa ennen lusikan täyttöä ja paikalleen asettamista. Käy potilaan kanssa läpi valkaisu-sarjan mukana toimitetut ohjeet. Näytä hänelle sitten lusikan täyttäminen annostelemalla yhtenäinen nauha geeliä noin puoliväliin inkisaalireunasta lusikan fakiaalipuolella molaarista molaariin. Selitä, että tähän pitäisi kuluu noin 1/3–1/2 ruiskun sisältämästä geelistä.



2. Aseta lusikka hampaiden päälle. Painele lusikkaa varovasti, jotta geeli asettuu oikeisiin paikkoihin. Jos lusikkaa painetaan liian voimakkaasti, geeliä vuotaa lusikasta.



3. Poista ylimääräinen geeli varovasti pehmeällä hammasharjalla.



4. Puhdista lusikka pehmeällä hammasharjalla ja viileällä vesijohtovedellä. Säilytä lusikka säilytysrasiassa käytön jälkeen. Kehota potilasta noudattamaan antamiasi valkaisuohjeita.





Valkaisulusikan valmistaminen



1. Vala jäljennös nopeasti kovettuvalla kipsillä tai erikoiskovalla kipsillä. Vala alinaatti mahdollisimman nopeasti jäljennöksen oton jälkeen, jotta jäljennös on mahdollisimman tarkka. Muotoilu on sitä helpompaa, mitä vähemmän kipsiä käytetään. Suulaen ja kielen alueita ei valeta tai ne on poistettava kipsin kovettumisen jälkeen. Anna mallin kuivua kaksi tuntia.



2. Valkaisuaineen tilaa varten annostele Ultradent LC Block-Out -resiiniä noin 0,5 mm:n paksuudelta labiaalipinnoille ja valokoveta sitten. Pysytele noin 1,5 mm:n etäisyydellä ienreunasta. **ÄLÄ** levitä inkisaalikärkiin tai okkluusaalipinnoille. Valokoveta VALO™-valokovettajalla jokaista hammasta 5 sekuntia. Pyyhi happi-inhiittorikerros pois.



3. Lämmitä lusikkamateriaalia (Sof-Tray™ Classic -vinyylilevyt) vakuumpressillä, kunnes se painautuu noin 2,5 cm. Muotoile plastisena muotin päälle. Jäähdytä, ja irrota malli vakuumpressistä.



4. Muotoile lusikan reuna varovasti ja tarkasti ikenen korkeuden mukaan ergonomisilla saksilla (Ultra-Trim-muotoilusakset). Hammastetut reunat auttavat välttämään kosketusta ienrudoksen kanssa.



5. Laita lusikka takaisin mallille, ja tarkista lusikan reunat. Viimeistele reunat varovasti liekillä neljännes kerrallaan, tarvittaessa kaasupolttimella. Mallin ollessa vielä lämmin paina heti kunkin segmentin reunoja tiukasti mallia vasten kolme sekuntia käsinneellä suojatulla, vedellä kostutetulla sormella. Jos lusikkamateriaali ohenee tällöin liikaa, valmistaa uusi lusikka.



Opalescence™ PF -potilaspackkaukset

	PF 10 %	PF 16 %
Mint	5364	4480
Melon	5365	4481
Regular	5366	4482

8 kpl 1,2 ml (1,50 g) Opalescence-ruiskua
1 kpl 20 ml (28 g) Opalescence-valkaisutahna
1 kpl lusikkarasia
1 kpl sävykartta



Opalescence™ PF -lääkäripakkaukset

	PF 10 %	PF 16 %
Mint	5379	4483
Melon	5380	4484
Regular	5381	4485

8 kpl 1,2 ml (1,50 g) Opalescence-ruiskua
1 kpl 1,2 ml (1,38 g) Ultradent LC Block-Out Resin -ruisku
1 kpl Black Mini -kärki
2 kpl Sof-Tray 0,9 mm -levy
1 kpl 20 ml (28 g) Opalescence-valkaisutahna
1 kpl lusikkarasia
1 kpl sävykartta



Opalescence™ PF -täyttöpakkaukset

	PF 10 %	PF 16 %
Mint	5394	4486
Melon	5395	4487
Regular	5396	4488

40 kpl 1,2 ml (1,50 g) Opalescence-ruiskua

