


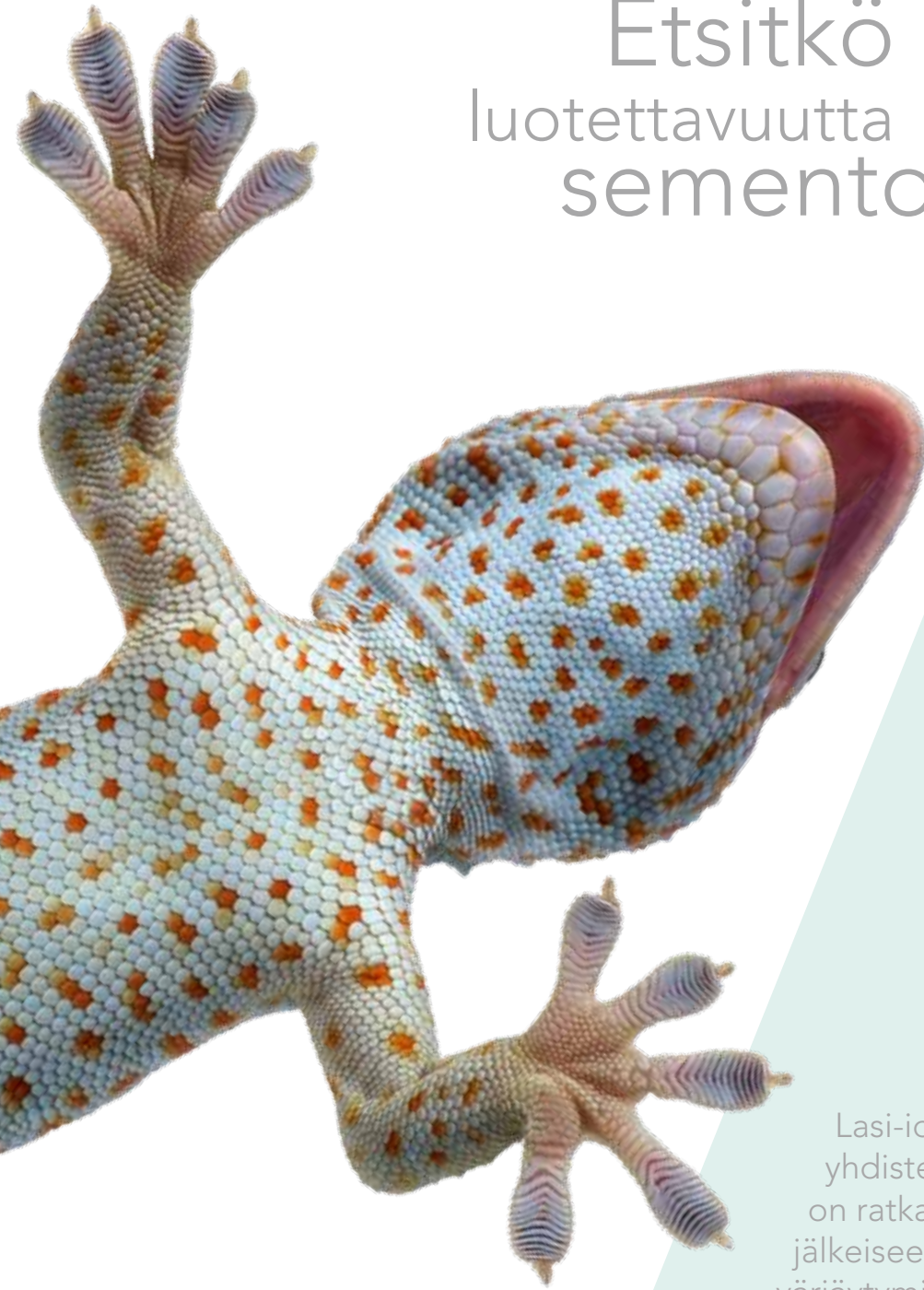

Etsitkö luotettavuutta sementointiin?



Fuji PLUS
GC Itä.

Lasi-ionomeerin ja
yhdistelmämuovin yhdistäminen
on ratkaisu sementoinnin
jälkeiseen herkkyyteen ja saumojen
värjäytymiseen.

GC

GC Fuji PLUS, valintasi kiinnityssementtisi

Fuji PLUS tarjoaa yksinkertaisen ja virheettömän sementoinnin sekä vahvan ja kestävänsidoksen johon voit luottaa.

15 vuotta luotettavuutta





Fuji PLUS on resiinivahvisteinen lasi-ionomeerikiinnityssementti, rutiininomaisiin kruunu- ja **siltatöihin, ja sillä on poikkeuksellisen hyvät pitkän aikavälin kliiniset tulokset¹**. Siksi tuhannet hammaslääkärit kaikkialla maailmassa ovat tehneet Fuji **PLUS:sta** ykköskiinnityssementtinsä.

Vuonna 2009 päivitetyn Reality-arvioinnin mukaan:
"Käsin sekoitettava tai Automix-kapselit, mukava tasaisuus, joka tekee **työn** asettamisesta helppoa, ja kohtuullinen läpikuultavuus, joten se ei näy valkoisena viivana **posliinin ja hampaan saumassa eikä ole liian juoksevaa.**"



Täydellinen konsistenssi

Fuji **PLUS:ssa** käytetään hienoksi jauhettuja **lasifillereitä**, joiden ansiosta saadaan **poikkeuksellisen sileää ja kermamainen sementtiseos**. Tämän tuloksena on hyvä juoksevuus ja ohut kerrospaksuus (10 mikronia), jonka ansiosta kaikkien kruunu-, silta- ja nastatöiden paikalleen vieni on helppoa.

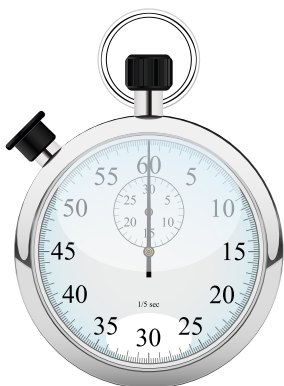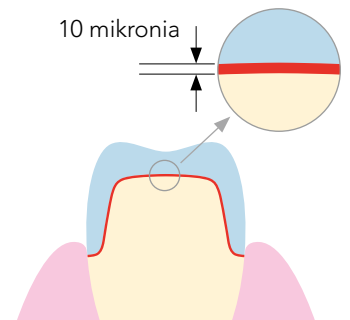

Snap set

Ylimäärien poisto 60 sekunnin kuluttua.

Fuji **PLUS:ssa** on ainutlaatuinen snap set -ominaisuus, jonka **ansioista** ylimääräinen sementti on helppo poistaa vain 60 sekunnin kuluttua. Jos halutaan hitaampaa kovettumista, Fuji PLUS -kapseleita voi jäähdyttää käsittely- ja kovettumisaikojen pidentämiseksi.



Todistettu kliininen teho ja ylivoimainen helppokäyttöisyys

Yleiskäyttöön sopiva

Runsaasti eri käyttötarkoituksia

- Kaikenlaisten metallisten, metallikeraamisten, muovikruunujen, inlay/onlay täytteiden sekä siltojen sementointiin²
- Posliinisten inlaytäytteiden sementointiin
- Kaikenlaisten pilarimateriaalien sementointiin, mukaan lukien valmiit ja valetut juurikanavanastat
- Sementoitavat, vahvistetut täyskeraamiset kruunut ja sillat (esim. Procera)



Turvallisuus


Kosteutta kestävä

Fuji PLUS kestää kosteutta viennin aikana ja sitoutuu kemiallisesti dentiiniin ja kiilteeseen. Hyvän saumatiivyyden ansiosta sementoinnin jälkeinen herkkyys on äärimmäisen vähäistä.

Fluorin vapautuminen

Jatkuva fluorin luovutus³ antaa jatkuvan suojan. Fuji PLUS:n haponkestävyys merkitsee erinomaista pitkän aikavälin sauman tiiviyyttä.

Fluorin vapautuminen

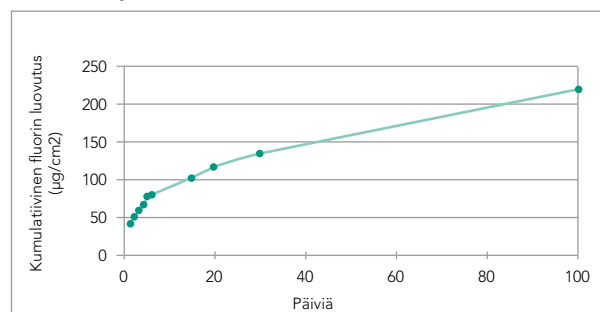


Lähde: GC:n tutkimus- ja kehitysoaston sisäisiä tietoja, tarkat testitiedot saatavana pyynnöstä

Lujuus

Suuri koheesiolujuus

Resiini vahvisteisen teknologian käyttö Fuji PLUS:ssa lisää merkittävästi sementtirakenteen koheesiolujuutta. Tämä korostaa lasi-ionomeerikemian kiinnitysetuja ja lisää sementin sidoslujuutta⁵.

Sidoksen vetolujuus

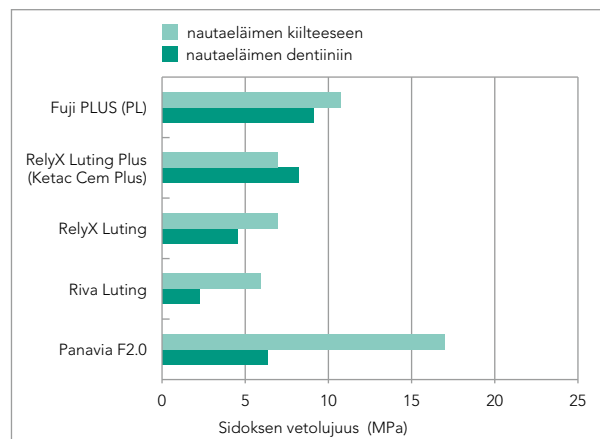

Lähde: GC:n tutkimus- ja kehitysoaston sisäisiä tietoja, tarkat testitiedot saatavana pyynnöstä

¹ Resin-modified glass ionomer cement and self-cured resin composite luted ceramic inlays. A 5-year clinical evaluation. Jan W.V. van Dijken. Dental Materials 19 (2003) 670-674

² Cementing porcelain-fused-to-metal crowns. Vadachkoria D. Georgian Med News. 2009 Dec; (177):15-9.

³ Fluoride release of resin-reinforced glass ionomer cements, H. Nakaseko, S. Tosaki and K. Hirota. IADR 1999, Abstract 972

⁴ Glass ionomer containing cements, ADA Professiona Product review, Vol. 3 Issue 1, Winter 2008

⁵ In vitro push-out strength of seven luting agents to dentin. J.-M. Cheylan, S. Gonther, M. Degrange. The International Journal of Prosthodontics, Volume 15, Number 4, 2002 – p.365-370

Resiini vahvistettujen lasi-ionomeerisementtien aatelia

Ylivoimaiset kiinnitys- ja tiiviysominaisuudet takaavat pitkän aikavälin pysyvyyden ja jatkuvan suojauksen hampaalle.

4 helppoa vaihetta luotettavaan sidokseen



1. Puhdista preparoidut hampaat huolellisesti. Kiinnityvyyden parantamiseksi vie Fuji PLUS Conditioner 20 sekunnin ajaksi. Huuhtelee ja kuivaa varovasti.



2. Sekoita Fuji PLUS kapselia 10 sekunnin ajan. Vie noin 1 millimetrin paksuinen kerros sementtiä työn sisäpinnalle ja aseta se paikalleen 30 sekunnin kuluessa.



3. Poista ylimääräinen sementti, kun sementti muuttuu geelimäiseksi (noin 1 minuutin kuluttua paikalleen viemisestä).



4. Säilytä suojaus, kunnes lopullinen kovettuminen on varmistettu (noin 4 minuuttia).

Tri L. Viard, Ranska

Ykkösvalinta kiinnityssementiksi



GC Fuji PLUS

GC Fuji PLUS kapselit

Laatikko 50 kapselia (0,19 ml / kapseli)
Saatavana olevat sävyt: keltainen, A3

GC Fuji PLUS 1-1PKG

Jauhe, 15 g, sävy A3
Neste, 7 ml, Conditioner, 6,5 ml, Tarvikkeet

GC Fuji PLUS P/L täyttöpakkaukset

Jauhe, 15 g. Saatavana olevat sävyt:
A3, keltainen, läpikuultava
Powder EWT (Pidennetty työskentelyaika), 15 g.
Sävy A3 Neste, 7 ml, Conditioner, 6,5 ml



GC FujiCEM (Automix)

Jos työ vaatii enemmän joustavuutta, FujiCEM Automix tarjoaa Fuji PLUS:n kaikki edut kätevässä Automix-muodossa. Näin saat pidemmän työskentelyajan ja muokattavissa olevan annostelun nastojen tai pitkien siltojen sementointiin.

GC FujiCEM Automix

2 Paste Pak ruiskua (13,3 g kummassakin),
44 sekoituskärkeä

GC FujiCEM Automix -täyttöpakkaukset

2 Paste Pak -ruiskua (13,3 g kummassakin)
20 sekoituskärkeä, Paste Pak -annostelija

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB

Finnish Branch
Vanha Hommaksentie 11B
FIN - 02430 Masala
Tel. & Fax.
+358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

