



Ultra-Blend™ plus

LINER




- Bioaktiivinen¹ liner ja pulpan kattausmateriaali
- Erinomainen kalsiumin vapautuminen²
- Valokovettuva
- Hallittu, tarkka annostelu ruiskulla
- Sekoitusta ei tarvita
- Ei liukene ajan mittaan
- Röntgenkontrasti
- Filleripitoinen

Ultra-Blend plus -liner on valolla aktivoitava, röntgenkontrastinen materiaali, joka sisältää kalsiumhydroksidia uretaanidimetakrylaattipohjassa (UDMA). Se sopii täydellisesti pulpan kattamiseen eikä liukene ajan mittaan. Ultra-Blend plus -liner sisältää paljon fillereitä, minkä vuoksi sen kutistuminen on vähäistä.




Pulpan kattaukseen käytetty
Ultra-Blend plus -liner.


Valovetteinen materiaali pulpan kattamiseen²

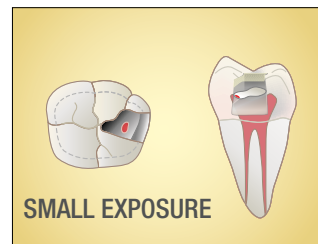


1. Käytä Ultra-Blend plus -lineriä lähellä pulpaa ja pienissä ei-hypereemisissä perforaatioissa. Jos perforaatio on laaja ja/tai pulpa on hypereeminen, aloita juurihoito.

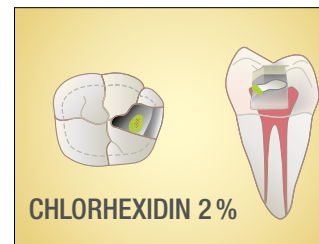


2. Annostele antibakteerinen liuos muovisella Blue Mini™ Dento-Infusor™- tai Black Mini™ Brush Tip -kärjellä 60 sekunnin ajan hellävaraisella hankaavalla liikkeellä. Kuivaa perusteellisesti. Älä huuhtelee.

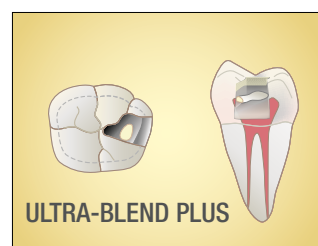

3. Annostele Black Micro -kärjellä Ultra-Blend plus -lineriä dentiiniin kuivaamiseksi pulpan suoraa tai epäsuoraa kattamista varten ja valokoveta. Peitä dentiiniä mahdollisimman vähän, jotta dentiiniä jäisi mahdollisimman paljon vapaaksi sidostusta varten.

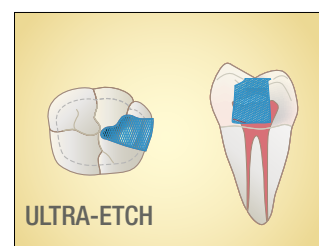

4. Applikoi Ultra-Etch™ 35 % fosforihappoetsausainetta 15 sekunniksi. Ime, huuhtelee ja kuivaa jättäen pinnan hieman kosteaksi.

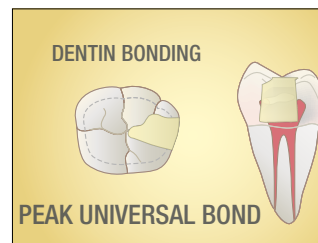

5. Applikoi Peak™ Universal Bond -sidosainetta Inspiral™ Brush -kärjellä, levitä kiilteen ja hiero dentiiniin 10 sekuntia. Puhalla ilmapuustilla ohueksi puoliteholla 2–3 sekuntia ja valokoveta 10 sekuntia VALO™-valokovettajan Standard-tilalla. Tee täyte korkealaatuisella yhdistelmämuovilla.

415 Ultra-Blend plus -pakkaus

2 kpl 1,2 ml (1,64 g) Dentin -ruiskuja
2 kpl 1,2 ml (1,64 g) Opaque White -ruiskuja
20 kpl Black Micro -kärkiä
20 kpl Black Mini -kärkiä

Säilytetään jääkaapissa.



416 Ultra-Blend plus Dentin -ruisku

417 Ultra-Blend plus Opaque White -ruisku

4 kpl 1,2 ml (1,64 g) -ruiskuja

Säilytetään jääkaapissa.



¹ Pameijer CH, Stanley HR, Norval G. Pulp capping with a new adhesive light cured calcium hydroxide formula [AADR abstract 757]. J Dent Res. 1998;77(suppl 1):200. ² Tiedot arkistossa.